



LRS ADVanced Sandwich-Klemme

53548 LRS ADVanced Sandwich-Klemme, höhe: 8 mm



53547 LRS ADVanced Sandwich-Klemme, höhe: 15 mm



Kompression-/Distractions-Element

Die Sandwich-Klemme wird zwischen der Basis und der Abdeckung einer LRS ADV geraden Klemme eingesetzt, um die Position zum Einführen der Schrauben über der Schiene zu erhöhen. Es sind zwei Modelle der Sandwich-Klemme verfügbar, entsprechend der von der Femurkrümmung bedingten Verschiebung: 8 mm (53548) und 15 mm (53547). Diese Klemme ist nützlich, wenn der Femur gekrümmt ist, um die Anbringung von Schrauben in der Mitte der Klemme im Zentrum des Knochens zu gestatten. Sie wird zusammen mit längeren Feststellschrauben verwendet, um eine Fixation an der Schiene zu ermöglichen. Ausgleichsstück (Kompressions-/Distractions-Elemente) für den Einsatz der Kompressions-/Distractions-Einheiten werden ebenfalls bereitgestellt.






Während der Assistent die distale Klemme sicher in Position hält, prüft der Chirurg, ob an den gewählten Stellen eine zufrieden stellende Einführung der Schrauben an der proximalen, distalen und zentralen Klemme möglich ist.



Wenn dies erreicht wurde, wird die Schiene in Position gehalten, während die Schrauben unter Verwendung des Standardverfahrens eingebracht werden.



Die Kompressions-/Distractions-Elemente werden auf der Abdeckung der geraden Klemme befestigt und die Kompressions-/Distractions-Einheiten werden eingeführt.

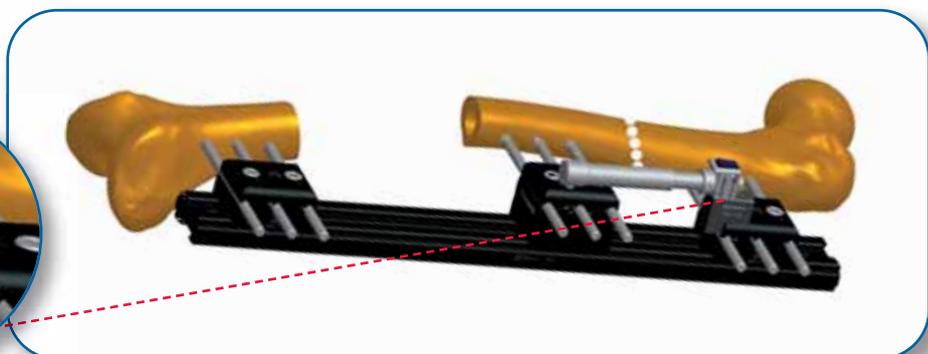

Hersteller:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9
37012 Bussolengo (Verona)
Italien

Tel. +39-0456719000
Fax +39-0456719380



Ihre Vertriebspartner:

Deutschland/Österreich
Orthofix GmbH

Siemensstr. 5
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 89 354 99 99 - 0
Fax: +49 89 354 99 99 - 77

info@orthofix.de